

Teste de gravidez

Resultados Rápidos

- Precisão superior a 99% a partir do dia previsto para o início da menstruação.
- **Leia atentamente este folheto antes de realizar um teste.**

1 Antes de fazer o teste

Poderá ser útil ter consigo um relógio ou cronómetro quando fizer o teste.

Pode fazer o teste a qualquer hora do dia a partir do dia previsto para o início da menstruação.

2 Fazer o teste

Quando estiver pronta para fazer o teste, retire o invólucro e remova a tampa. Use a vareta de teste de imediato.

Pode fazer o teste diretamente no fluxo urinário **ou** numa amostra de urina recolhida num recipiente seco e limpo.

- Mantenha a ponta com alteração da cor virada para baixo no fluxo urinário **ou** numa amostra de urina recolhida, como ilustrado, durante **5 segundos completos**.
- A ponta com alteração da cor muda instantaneamente para cor-de-rosa mostrando que a urina está a ser absorvida. **Deve continuar a manter a ponta com alteração da cor na urina durante 5 segundos completos.**



Tampa

Ponta com alteração da cor

- Mantenha a ponta com alteração da cor virada para baixo ou coloque a vareta de teste na horizontal até estar preparada para ler o resultado e aparecer uma linha azul na janela de controlo.



Deve continuar a manter a ponta com alteração da cor na urina durante 5 segundos completos.



Comece a contar os 5 segundos assim que a ponta com alteração da cor ficar cor-de-rosa.

Fluxo urinário

OU

Amostra recolhida

- Se quiser, pode voltar a colocar a tampa.
- Se a ponta com alteração da cor não ficar completamente cor-de-rosa, consulte a pergunta 5.



AGUARDE 3 MINUTOS.

Assim que começarem a aparecer linhas azuis, isso significa que o teste está a funcionar.

3 Ler o resultado


Pode ler o resultado na janela de resultados.

Quando lê o resultado, a janela de controlo tem de apresentar uma linha azul. Esta linha mostra que o teste funcionou.

O resultado "Grávida" poderá ser apresentado dentro de 1 minuto quando o teste é efetuado a partir do dia em que não teve menstruação (que será o dia após o previsto para o início da menstruação).

Deve aguardar os 3 minutos completos para confirmar um resultado "Não Grávida" (consulte a pergunta 8).

Se não vir uma linha azul na janela de controlo, isso significa que o teste não funcionou (consulte a pergunta 6).

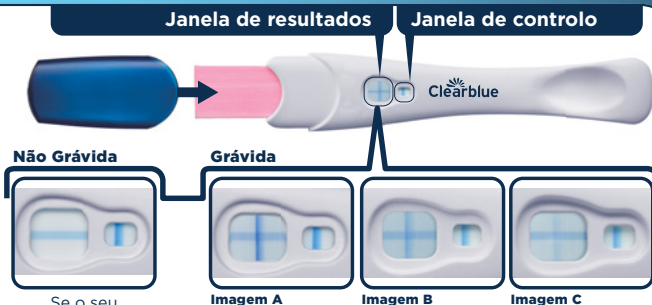

Não Grávida

Grávida



Se o seu resultado for "Não Grávida", consulte a pergunta 10.

Imagem A

Imagem B

Imagem C

- Se o seu resultado for "Grávida", consulte a pergunta 11.
- Se ainda tiver dúvidas quanto ao seu resultado, consulte a pergunta 7.

Não é relevante que uma das linhas do símbolo "+" seja mais clara ou mais escura do que a outra: o resultado é "Grávida".

IMPORTANTE! Leia o resultado no prazo de **10 minutos** após fazer o teste. Ignore quaisquer alterações no resultado depois deste período de tempo.

Perguntas e Respostas

- 1 Qual é o grau de precisão do teste Clearblue?**
O teste Clearblue oferece mais de 99% de precisão em testes laboratoriais, quando usado a partir do dia previsto para o início da menstruação.
- 2 Como funciona o teste Clearblue?**
Quando está grávida, o seu corpo produz a hormona da gravidez hCG (gonadotropina coriônica humana). A quantidade de hCG no corpo aumenta na fase inicial da gravidez. O Clearblue Resultados Rápidos é capaz de detectar pequenas quantidades desta hormona na urina (a sensibilidade do teste é de 25 mIU/ml).
- 3 Não tenho a certeza da data prevista para a minha próxima menstruação. Como poderei saber se estou a fazer o teste na altura certa?**
Para determinar a data prevista para o início da menstruação, calcule a duração habitual do ciclo contando o número de dias desde o primeiro dia da menstruação anterior até ao dia anterior ao do início da menstruação seguinte.
- Se tiver ciclos irregulares, deverá considerar o ciclo mais longo nos meses imediatamente anteriores à realização do teste.
- Se o resultado for "Não Grávida" e ainda assim suspeitar que está grávida, consulte a pergunta 10.

- 4 O resultado pode ser afetado por medicamentos ou outros problemas de saúde?**
- Antes de fazer o teste, leia sempre as instruções do fabricante de qualquer medicamento que esteja a tomar.
 - Medicamentos para a fertilidade contendo hCG podem dar resultados enganosos (geralmente, estes medicamentos são injetados e o teste logo após a administração pode dar um resultado positivo de "Grávida" falso).
 - Outras terapêuticas de fertilidade (como citrato de clomifeno), analgésicos e contraceptivos hormonais (por exemplo, pílula anticoncepcional) não devem afetar o resultado.
 - Se tiver parado recentemente de usar contraceptivos hormonais ou estiver a usar terapêuticas de fertilidade, como o citrato de clomifeno, a menstruação pode ser irregular, levando-a a fazer o teste demasiado cedo.
 - Se tiver estado grávida recentemente (mesmo que a gravidez não tenha sido levada até ao fim), poderá obter um resultado positivo de "Grávida" falso.
 - Gravidez ectópica, quistos nos ovários, menopausa e alguns problemas de saúde muito raros podem dar resultados enganosos.
 - Caso o resultado seja "Grávida", é possível que mais tarde saiba que não está grávida por perda natural da gravidez que pode ocorrer nas primeiras fases.
- Se obtiver resultados inesperados, converse com o seu médico.

- 5 Usei o teste de gravidez, mas a ponta com alteração da cor não ficou totalmente cor-de-rosa. O que devo fazer?**
Se a ponta com alteração da cor não ficou totalmente cor-de-rosa, significa que poderá não ter aplicado a urina suficiente. Contudo, se a linha azul na janela de controlo aparecer no prazo de 10 minutos após fazer o teste, significa que o teste funcionou. Se não aparecer nenhuma linha azul na janela de controlo no prazo de 10 minutos depois de fazer o teste, consulte a pergunta 6.
- 6 Usei o teste de gravidez mas não apareceu nenhuma linha azul na janela de controlo. O que devo fazer?**
Se não aparecer nenhuma linha azul na janela de controlo no prazo de 10 minutos após fazer o teste, isso significa que o teste não funcionou. Tal pode ocorrer devido aos seguintes motivos:
- A ponta com alteração da cor não foi mantida virada para baixo ou a vareta de teste não foi colocada na horizontal após a aplicação da urina.
 - Foi usada urina insuficiente ou em excesso. **Deve fazer a amostragem durante 5 segundos.**

Deverá efetuar um novo teste com uma vareta de teste nova, seguindo cuidadosamente as instruções. Se quiser, pode colhear uma amostra de urina num recipiente limpo e seco e mergulhar apenas a ponta com alteração da cor durante 5 segundos.

- 7 E se eu tiver dúvidas sobre o resultado?**
- Para que o seu resultado seja "Grávida", deve haver uma linha azul na janela de controlo e um símbolo de "+" na janela de resultados no prazo de 10 minutos após fazer o teste.
- O aparecimento do símbolo "+" na janela de resultados pode variar, mas as linhas que formam o "+" e a linha na janela de controlo devem ter uma largura semelhante (consulte as imagens A-C).
- Imagem A**
É mais provável ocorrer quando está grávida e faz o teste mais do que alguns dias após o dia previsto para o início da menstruação, uma vez que os níveis de hCG são mais altos.
- Imagem B**
Não é incomum quando está grávida e faz o teste no ou perto do dia previsto para o início da menstruação, uma vez que os níveis de hCG ainda são relativamente baixos.
- Imagem C**
Indica um resultado "Grávida", apesar de estar pouco nitido. Se ainda tiver dúvidas sobre o resultado, deverá aguardar pelo menos 3 dias antes de repetir o teste, seguindo cuidadosamente as instruções.
- Para que o seu resultado seja "Não Grávida", deve aparecer uma linha azul na janela de controlo e um símbolo "-" (menos) na janela de resultados no prazo de 10 minutos após fazer o teste. Se o resultado for "Não Grávida" e ainda assim suspeitar que está grávida, consulte a pergunta 10.

- 8 Quando é que posso ler o resultado?**
O resultado "Grávida" poderá ser apresentado no prazo de 1 minuto quando o teste é efetuado a partir do dia em que não teve menstruação (que será o dia após o previsto para o início da menstruação). Certifique-se de que também é apresentada uma linha azul na janela de controlo antes de ler o resultado. **Tem** de aguardar 3 minutos para confirmar um resultado "Não Grávida". Se não aparecer nenhuma linha azul na janela de controlo no prazo de **10 minutos**, significa que o teste não funcionou (consulte a pergunta 6).
- 9 Quanto tempo dura a apresentação do resultado?**
O resultado pode ser lido a qualquer momento dentro do intervalo de 3 a 10 minutos. Após os 10 minutos, deve ignorar qualquer alteração no resultado.
- 10 O meu teste indica "Não Grávida". O que devo fazer?**
Pode não estar grávida ou o nível da hormona da gravidez pode estar abaixo do limite de deteção. Pode ainda ter calculado mal o dia previsto para o início da menstruação.
- Caso tenha feito o teste precocemente, repita-o na altura prevista para o início da menstruação.
 - Se essa data já tiver passado, faça o teste novamente 3 dias depois. Se o teste produzir o resultado "Não Grávida" e a menstruação ainda não tiver aparecido, consulte o seu médico.
- 11 O teste indica "Grávida". O que devo fazer?**
Se o teste indicar que está grávida, deverá consultar o seu médico que irá orientá-la nos passos a tomar a seguir.

www.clearblue.com

Para mais informações sobre este produto, contacte o nosso Apoio ao Consumidor na seguinte morada

Para saber mais sobre os passos seguintes, informações e recomendações gerais relacionadas com a gravidez, visite o nosso Web site em:

www.clearblue.com

	Fabricante		Não reutilize
	Código do lote		Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>
	Prazo de validade		Limites de temperatura 2°C - 30°C

Para autodiagnóstico em casa.

Apenas para uso em diagnóstico *in vitro*.

Não se destina a uso interno.

Não reutilizar.

Mantenha longe do alcance das crianças.

Armazenar entre 2 e 30 °C.

Deixar atingir a temperatura ambiente durante 30 minutos antes de testar, se armazenado com refrigeração.

Não usar se o invólucro estiver danificado.

Não usar após o prazo de validade.

Eliminar com os resíduos domésticos comuns.



SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genebra, Suíça.
Clearblue é uma marca comercial da SPD.
© 2019 SPD. Todos os direitos reservados.

2300490.02 03-2019



0123